


IN.PACT™ AV DCB 実施基準教育プログラム

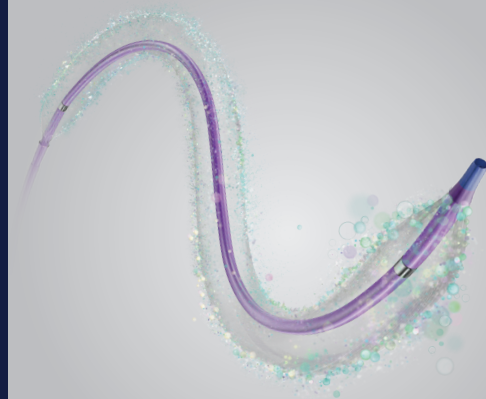

IN.PACT™ AV
Drug-Coated Balloon

IN.PACT™ AV 薬剤コーティングバルーンカテーテルは、承認条件に基づく“シャントDCB適正使用指針”に則り、すべてのユーザーにトレーニングの受講が義務付けられています。
トレーニングの受講には、オンライン登録が必要です。本サイトでは、申込みから修了まで一貫して行えます。

IN.PACT™ AV DCB実施基準教育プログラム への登録

下記URL にアクセスし、当プログラムへの登録をお願いします。

<https://www.avaccess-dcb-net.jp>



ご登録に際して

実施基準教育プログラムの受講には、登録が必要です。

当プログラムを受講（登録）するためには、ご所属施設が下記施設基準に該当し、ご登録者が下記の術者基準のいずれかに該当している必要があります。

【施設基準】

- 合併症が生じた際に、再建等の対応が自施設で可能であること、もしくは対応可能な施設と連携していること
- X線透視装置を備えていること
- シャントPTAを施行している施設であること

【術者基準】

- 日本心血管インターベンション治療学会認定医
- 日本IVR学会専門医
- 日本血管外科学会認定血管内治療医
- 日本透析医学会認定血管内治療医
- 日本透析アクセス医学会VA血管内治療認定医

受講のながれ

- 1 “新規登録”を行い、パスワードを取得してください。
- 2 登録いただいたユーザーID及びパスワードを入力の上、ログインしてください。（新規登録後、続けて受講いただくことも可能です。）
- 3 実施基準教育プログラムのトレーニング（オフサイトまたはオンラインいずれか）を受講後、“確認テスト”に合格いただき修了となります。
- 4 修了証は、本サイトより出力可能です。

全ユーザー

新規登録



トレーニング受講
(オンサイトまたはオンラインの
いずれかを受講)
*詳細は裏面参照



確認テスト
合格



修了
(修了証発行)

Medtronic

IN.PACT™ AV DCB 実施基準教育プログラム

■ トレーニングについて

“オンライン・トレーニング”とは：

- トレーニングを当該サイト上で受講いただけます。
- 「受講する」ボタンをクリックして各トレーニングを受講してください。
- 動画の再生には、MP4形式の動画が再生可能なブラウザをご利用ください。
- 確認テストは、トレーニング受講後に行うのみ受験可能となります。

“オンサイト・トレーニング”とは：

- 会場にて受講いただくトレーニングです。（適宜開催）
- サイト内にて受講予約を行うことができます。
 - ① ご都合の良いトレーニングの「受講する」ボタンより、「受講証」をプリントアウトいただき、当日会場にお持ちください。
 - ② トレーニング終了後、「受講証」を会場出口にて提出いただくことで、“オンサイト・トレーニング”完了となります。
- “オンサイト・トレーニング”を受講いただいた方は、“オンライン・トレーニング”を受講いただく必要はございませんが、オンライン上で確認テストに合格する必要があります。
- オンサイト・トレーニング受講後、確認テストについてのお知らせがメールにて配信されますので、そちらをご確認いただき、確認テストをお受けください。

シャントDCB適正使用指針

適応

- DCBを使用する前に、優先すべきその他の治療（再建、ステントグラフト、バルーン拡張、カッティングバルーン、スリッピング防止型バルーン、等）がないか十分に検討すること。
- DCBを使用しても開存期間延長効果が得られないと判断した場合にむやみに繰り返しDCBで治療せず、再建などの適切な治療を行うこと。
- 原則として、再狭窄病変に使用することが望ましい。
- 血栓性閉塞病変には使用しない。
- 狭窄率50%以上、病変長10cm以下の病変に使用する。
- バルーンによる前拡張で30%未満の残存狭窄で重篤解離が無い病変にDCBを使用する。

施設基準

- 合併症が生じた際に、再建等の対応が自施設で可能であること、もしくは対応可能な施設と連携していること
- X線透視装置を備えていること
- シャントPTAを施行している施設であること

術者基準

- CVIT（日本心血管インターベンション治療学会）認定医、IVR学会専門医、血管外科学会認定血管内治療医、透析医学会認定血管内治療医、日本透析アクセス医学会VA血管内治療認定医
- 日本メドトロニック株式会社が行った教育コースを受講していること

レジストリー

- 施行した症例は5学会（CVIT、日本IVR学会、日本血管外科学会、日本透析医学会、日本透析アクセス医学会）合同シャントDCBレジストリーに全例登録する

販売名：IN.PACT AV薬剤コーティングバルーンカテーテル
医療機器承認番号：30200BZX00309000

Medtronic

日本メドトロニック株式会社

問合せ先：rs.avdcb-net@medtronic.com

[medtronic.co.jp](https://www.medtronic.co.jp)

使用目的又は効果、警告・禁忌を含む使用上の注意等の情報につきましては製品の添付文書をご参照ください。
本製品の使用に際しては、関連学会により策定された適正使用指針を遵守ください。

© 2021 Medtronic. メドトロニック及びMedtronicロゴマークは、Medtronicの商標です。
その他すべての商標は、Medtronic companyの商標です。